

SUPERCOMFORT ZACHTE MAANDLENZEN

⚠ DEZE FOLDER BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE. LEES AAN-
DACHTIG EN BEWAAR DE FOLDER ZODAT U HEM LATER NOG KAN
RAADPLEGEN.

CONTACTLENZEN DIENEN STEEDS TE WORDEN Aangepast door
EEN CONTACTLENSPECIALIST.



MATERIAAL EN VERPAKKING

STERILE Supercomfort zachte maandlenzen bevatten 67% lotrafilcon B
en 33% water en worden bewaard in een fosfaatgebufferde zoutoplossing.
De lenzen hebben een lichtblauwe tint om ze beter te kunnen hanteren; de
tint bevat Cu-phthalocyanine.

GEBRUIKSDOEL

Supercomfort zachte maandlenzen zijn bedoeld voor overdag dragen,
zoals bepaald door uw contactlensspecialist, voor de optische
gezichtscorrectie van personen met gezonde ogen.

AANBEVOLEN SCHEMA VOOR HET DRAGEN EN DE VERVANGING VAN DE LENZEN

Supercomfort zachte maandlenzen dienen elke maand te worden weg-
gegooid en vervangen door nieuwe.

MANIPULATIE VAN UW LENZEN

- Zie schema 1-5.
- De lens niet gebruiken als de verpakking open of beschadigd is.
- Uw contactlensspecialist dient u gedetailleerde aanwijzingen te ver-
strekken voor het inzetten en het uitnemen van contactlenzen.
- Schud de blisterverpakking zachtjes voordat u hem opent. Trek de folie
weg. Laat de lens in de palm van uw hand glijden en gebruik daarbij
zodanig voorzichtig uw wijsvinger.
- Gebruik nooit een pincet, zuignappen, een scherp voorwerp of uw
nagels om uw lenzen uit te nemen of ze uit de lenshouder/blister te
halen.
- Zet geen beschadigde lenzen in.

DE VERZORGING VAN UW LENZEN

- CORRECTE VERZORGING VAN UW LENZEN IS ESSENTIEEL.
- Uw contactlensspecialist moet het meest geschikte verzorgingssysteem
voor u selecteren.
- Het is van essentieel belang dat u de instructies op de gebruiksaanwijzing
van uw lensverzorgingsproducten opvolgt.
- Gebruik nooit hittedesinfectie of andere producten die voor harde of
vormvaste gasdoorlatende lenzen zijn bedoeld.
- Breng contactlenzen NOOIT in contact met niet-steriel water (inclusief
leidingwater), daar microbiële besmetting, die kan leiden tot permanente
oogbeschadiging, kan optreden.
- Spoel uw lenshouder dagelijks met een steriele zoutoplossing of een
verse oplossing van een lensverzorgingsproduct en laat hem aan de
lucht drogen. Dit helpt vervuiling en ernstig oogletsel te vermijden.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Controleer elke dag uw ogen, wanneer u contactlenzen draagt. Uw ogen
moeten er gezond uitzien, comfortabel aanvoelen en u moet goed kunnen
zien. Zo niet, neem de lenzen dan onmiddellijk uit en neem contact op met
uw contactlensspecialist. Ongewone symptomen die worden genegeerd
kunnen tot ernstige complicaties leiden.

WANNEER DE LENZEN NIET TE DRAGEN

Contactlenzen mogen niet worden gedragen als u bepaalde medicijnen
gebruikt, waaronder oogmedicijnen, of bij droge ogen (ontoereikende
traanfilm). Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw oogarts of contact-
lensspecialist.

WAT INDIEN ZICH EEN PROBLEEM VOORDOET ?

- NEEM DE LENS ONMIDDELIJK UIT.
- Occasionele droogheid kan worden tegengegaan door het gebruik van
comfort- of bevochtigingsdruppels. Raadpleeg uw contactlensspecialist
indien de droogheid aanhoudt.
- Als een lens vastplakt (niet meer beweegt), breng dan enkele comfort-
druppels aan en wacht tot de lens vrij begint te bewegen voordat
u hem probeert uit te nemen. Als de lens blijft plakken, neem dan
ONMIDDELIJK contact op met uw contactlensspecialist.

AANVULLENDE INFORMATIE

Roken vergroot het risico op keratitis ulcerosa bij contactlensdragers.

BELANGRIJKE PUNTEN OM TE ONTHOUDEN

- Contactlensdragers wordt aangeraden om volgens de instructies
regelmatig de contactlensspecialist te bezoeken.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van zeep, lotions, crèmes, cosmetica
en deodorants aangezien deze irritatie kunnen veroorzaken als ze in
contact komen met uw lenzen.
- Zet uw lenzen in **voordat** u make-up aanbrengt en neem ze uit **voordat**
u de make-up verwijdert.
- Vermijd het gebruik van spuitbussen, bijvoorbeeld haarlak, in de buurt
van uw ogen wanneer u lenzen draagt. Dit kan irritatie veroorzaken.
- Het dragen van contactlenzen tijdens het zwemmen wordt niet
aanbevolen – vraag uw contactlensspecialist om advies.
- Neem de lenzen uit wanneer u wordt blootgesteld aan schadelijke of
irriterende dampen.
- Verwittig uw werkgever dat u contactlenzen draagt, in het bijzonder als
u oogbescherming dient te gebruiken tijdens het werk.

BC	Radius
PWR	Sterkte
DIA	Diameter

Lenzen worden geleverd volgens beschikbaarheid.
Uitgavedatum: 05/2007 Prf 1-040406

Fabr. /Herst./Manuf.:
CIBA Vision Corporation
Duluth, Georgia 30097, USA.



Eu. Vert. /Rep. Eu.:
CIBA Vision GmbH
63868 Grosswallstadt, Duitsland

Distr.:
Optichains B.V., Papland 21,
4206 CK, Gorinchem, NL